


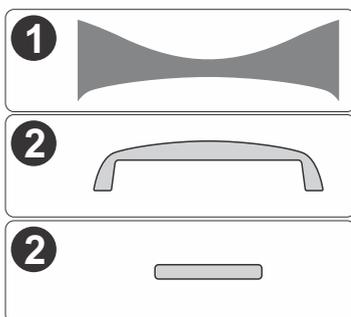

CONTEÚDO DESTA EMBALAGEM:

- 1 Gabarito EVA 3mm (DESCARTÁVEL)
- 2 Suporte EVA 40mm frontal
- 3 Suporte EVA 10mm traseiro



Obs: Este acessório é opcional.


Devido a relatos oferecidos por profissionais que utilizam o aparelho

com frequência, quando a parte frontal do aparelho fica posicionada de forma elevada, o risco de queda das ponteiros diminui consideravelmente. Evitando assim transtornos futuros com possíveis quebras.

1º Passo

Aplique o gabarito em **EVA 3mm** na superfície do tampo superior, conforme a figura ao lado.

Obs.: lembre-se de retirar a película protetora da fita dupla face, para que o gabarito possa ficar temporariamente fixo.

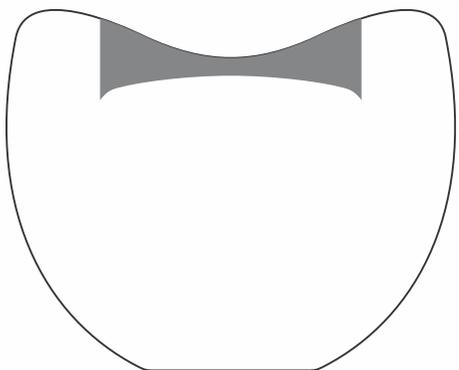


Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

2º Passo

Posicione o suporte de **EVA 40mm**, de forma a encaixar no gabarito em **EVA 3mm**, conforme figura ao lado.

Obs.: lembre-se de retirar a película protetora da fita dupla face, para que o suporte em **EVA 40mm** possa aderir de forma definitiva ao tampo da mesa auxiliar Newskin.

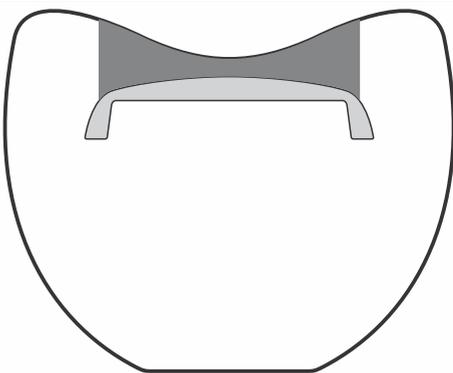

3º Passo

Retire o gabarito.

Posicione o aparelho NewSkin, de forma a encaixá-lo no suporte já colado por sobre o tampo da mesa.

Retire a fita protetora do **EVA 10mm**, e posicione na parte traseira central do aparelho Newskin, de forma a proporcionar o perfeito encaixe para que o mesmo fique preso sem folgas.

