





ESCADA AUXILIAR UTILITY

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

Antes de montar, prepare o local, certificando-se que está em boas condições de limpeza e com espaço necessário para a montagem. Utilize o papelão da própria embalagem e o plástico bolha para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

CONTEÚDO DESTA EMBALAGEM:

- 1 02 peças laterais
- 2 01 degrau de 43x23,5cm
- 3 01 degrau de 43x20,5cm
- 4 02 peças laterais 36x8cm
- 5 01 chave philips

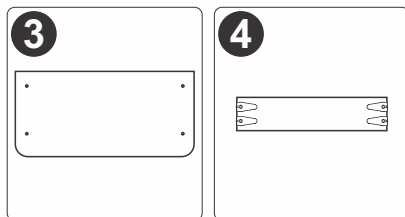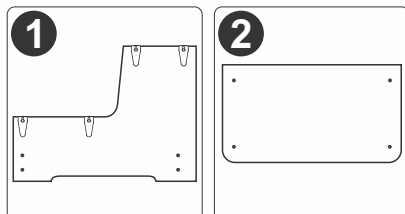


ESPECIFICAÇÕES:

ESCALA AUXILIAR UTILITY MR-ES053

Medidas do móvel:

- Largura: 43 cm
- Comprimento: 46 cm
- Altura: 35 cm
- Material: MDF

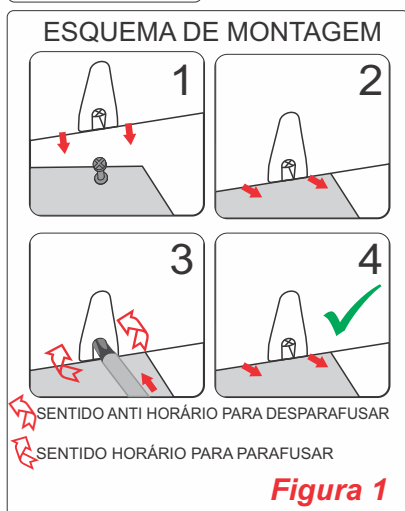

MONTAGEM:



DICA: Utilize a chave philips que vem junto com as peças para facilitar a montagem, inclusive nos espaços

1º Passo

Posicione uma das laterais da mesa sobre uma superfície plana, com os pinos para cima.



2º Passo

Faça o encaixe e fixação dos degraus menor e maior nos dispositivos de montagem, conforme a **figura 1**.

Obs.: Aperte os parafusos:

- ▶ Sentido anti-horário desparafusa
- ▶ Sentido horário parafusa.



3º Passo

Faça o encaixe e fixação da outra lateral, respeitando a ordem mostrada pelas setas da figura ao lado, e aperto dos dispositivos de montagem conforme **figura 1**.

Obs.: Aperte os parafusos:

- ▶ Sentido anti-horário desparafusa
- ▶ Sentido horário parafusa.



4º Passo

Faça o encaixe e fixação dos reforços, fixando os dispositivos de montagem conforme **figura 1**.

Obs.: Aperte os parafusos:

- ▶ Sentido anti-horário desparafusa
- ▶ Sentido horário parafusa.



